


optiview

ORION

MULTIPURPOSE SOLUTION MET HYALURONAAT

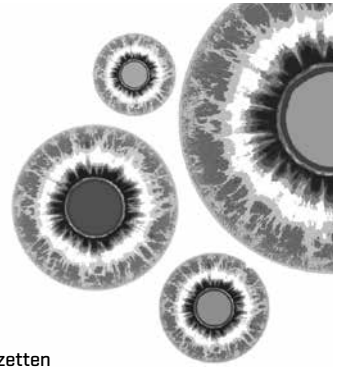

Voor reinigen, verwijderen van proteïneaanslag, desinfecteren, afspoelen, bewaren, inzetten en bevochtigen. Voor zachte contactlenzen.

MEDISCH HULPMIDDEL

SAMENSTELLING

Werkzaam bestandsdeel: Hyaluronaat

Conserveermiddel: PHMB 0,00002%, Polyquaternium 0,00065%

Lees de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van Optiview Orion Multipurpose Solution in combinatie met uw contactlenzen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

- Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt.
Droog uw handen met een schone handdoek.
- De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien.
- Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met enkele druppels *Optiview Orion Multipurpose Solution*.
Reinig de lenzen door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 10-15 seconden te masseren.
- Spoel de lenzen af met *Optiview Orion Multipurpose Solution*.
- Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 6 uur in de lenshouder gevuld met verse *Optiview Orion Multipurpose Solution*.
- Haal de lenzen na de desinfectiecyclus uit de lenshouder, spoel de lenzen met *Optiview Orion Multipurpose Solution*.
af en zet de lenzen in uw ogen. Spoel de lenshouder af met *Optiview Orion Multipurpose Solution* en laat de lenshouder drogen aan de lucht.
- De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.
- De flacon na gebruik direct sluiten.


OVERIGE AANWIJZINGEN

Na bewaring gedurende meer dan 7 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. Vervang regelmatig uw lenshouder om infectie door vervuiling te voorkomen.

optiview

ORION

MULTIPURPOSE SOLUTION MET HYALURONAAAT

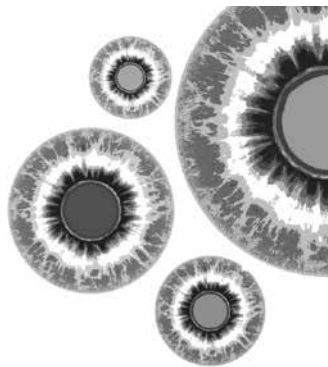

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is.
- Gebruik of meng *Optiview Orion Multipurpose Solution* niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken.
- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
- Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist.
- Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

NIET GEBRUIKEN

- Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof.
- Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

BEWAREN

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bewaren tussen 4 °C en 25 °C.
- Bescherm tegen zonlicht.
- Bewaren in de originele verpakking.
- Na openen 3 maanden houdbaar.

BIJWERKINGEN

Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen *Optiview Orion Multipurpose Solution* niet gebruiken.



Otè Pharma Sol B.V.

Vluchtoord 38, NL- 5406 XP Uden


DISTRIBUTEUR

Optitrade B.V., NL-3994 VZ HOUTEN

Optiview Orion is een handelsmerk van Optitrade B.V.

© Optitrade B.V.

STERILE A

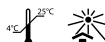

0344

01REF1904 1D/2020