


optiview

OTILA

REINIGINGSVLOEISTOF

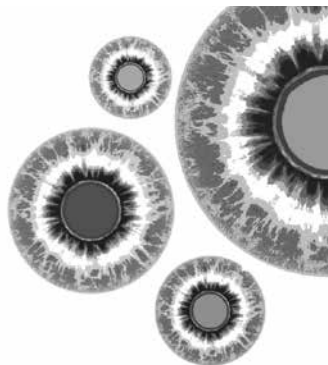

Voor reinigen. Voor alle contactlenzen.

MEDISCH HULPMIDDEL

SAMENSTELLING:

Werkzaam bestanddeel: niet-ionogene reinigende bestanddelen.

Conserveermiddel: PHMB 0,002 %.

Lees de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van Optiview Otila in combinatie met uw contactlenzen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING:

Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek.

De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien.

Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met enkele druppels Optiview Otila. Reinig de lenzen door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 30 seconden te masseren.

Spoel vervolgens beide zijden van de lens met Optiview Orion.

Hierna kunt u de met Optiview Orion bevochtigde lenzen inzetten.

De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

De flacon na gebruik direct sluiten.


WAARSCHUWINGEN:

- Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is.
- Nooit de lenzen direct uit de Optiview Otila in de ogen zetten, zonder te spoelen, zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Gebruik of meng Optiview Otila niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken.
- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
- Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist.
- Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.
- De flacon goed schudden voor gebruik.

optiview

OTILA

REINIGINGSVLOEISTOF

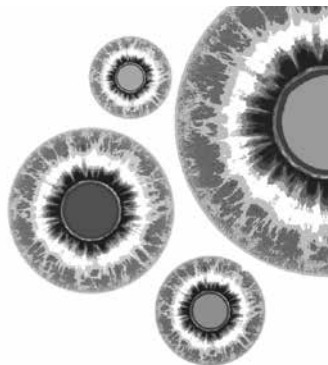

NIET GEBRUIKEN:

- Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof.
- Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

BEWAREN:

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaren tussen 4 °C en 25 °C.

Bescherm tegen zonlicht.

Bewaren in de originele verpakking.

Na openen 3 maanden houdbaar.

BIJWERKINGEN:

Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen Optiview Otila niet gebruiken.



Oté Pharma Sol B.V.


Vluchtoord 38, NL- 5406 XP Uden

DISTRIBUTEUR

Optitrade B.V., NL-3994 VZ HOUTEN

Optiview Otila is een handelsmerk van Optitrade B.V.

© Optitrade B.V.

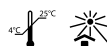

CE 0344

01REF1908 10/2020